

Taco Abductor Aquatec® Orca

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente estas instrucciones de montaje. Preste atención a todas las instrucciones, especialmente aquellas relacionadas con seguridad y respételas siempre.

Preste atención también a las instrucciones de operación de las herramientas utilizadas en el montaje. Tenga mucho cuidado cuando realice los agujeros de no lastimarse las manos y/o los dedos.

A. Piezas entregadas

1. Taco abductor
Ref. 1525932 (ø7cm)
Ref. 1525933 (ø12 cm)

B. Herramientas necesarias :

1. Taladro eléctrico ø11mm
2. Escariador 15x90° para ajustar

C. Preparación

1. Retire la cobertura del respaldo y del asiento considerando las instrucciones del manual de usuario.
2. Coloque el producto en el suelo o en una mesa (base plana y fija) lateralmente, de forma que el lazo izquierdo quede hacia arriba. Para abrir las tijeras de elevación presiones el botón rojo en el eje inferior.

Cuidado : riesgo de pillarse los dedos con la tijera.

D. Montaje

1. Taladre a través del asiento en la posición correcta para el taco abductor guiándose con el dibujo.
2. Retire los restos de material del agujero desde la parte superior a la inferior.
3. Coloque la cobertura del asiento.
4. Utilice un par de tijeras para cortar un agujero en la cobertura del asiento en la posición del agujero del asiento.
5. Monte el respaldo
6. Monte el taco abductor en el elevador de bañera colocando la sujeción en el agujero del asiento. Sujete la cuña con una mano y con la otra gire la palomilla en sentido de las manecillas del reloj para asegurar la cuña.
7. Para desmontar, gire la palomilla. Gire la palomilla hasta alcanzar un tope, empujar el cuña abductora hacia arriba fuera del agujero.

